

Ръководство на потребителя за слухов усилвател Beurer HA 50

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Слуховият усилвател е уред, предназначен да помага на хората да чуват по-добре. Той улавя и усилюва звуците, след което ги предава на ухото. Не може да предотврати или намали органично причинена глухота.

2. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Трябва да проверите слуха си при специалист преди да използвате уреда. Настройките на уреда трябва да се правят само от специалист.
- Уредът не трябва да се използва, ако страдате от възпаление на ухото или инфекция.
- Ако не се чувствате добре или изпитвате болка при носенето на усилвателя, консултирайте се с лекар. Както и при наличие на събиране на ушна кал.
- Ако в ухото ви остане част от слуховия парата, не я махайте сами, а потърсете лекарска помощ.
- Настройте отначало на слаб звук и увеличете постепенно силата докато не свикнете с уреда.
- Не давайте уреда за ползване от друг човек, за да намалите риска от инфекция и повреда на слуха.
- Уредът не е подходящ за използване от деца под 36-месечна възраст.
- Пазете уреда, аксесоарите и батериите далеч от деца.
- Уредът не е предназначен за употреба от хора (вкл. деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности без надзора на възрастен, отговорен за тяхната безопасност.
- Не използвайте уреда в потенциално експлозивна и опасна среда.
- Не използвайте уреда в среда, богата на кислород, за дълъг период от време.
- Ако устройството е повредено или не работи както трябва, изключете го незабавно.
- Не отваряйте уреда. Поправки трябва да се извършват само от оторизиран технически персонал.
- Не използвайте в близост до силни електромагнитни полета или рентгенови апарати.
- Не използвайте уреда с мобилен телефон. Радиовълните от телефона могат да предизвикат шум или намалена сила на звука.
- Не използвайте уреда докато се къпете или плувате.

- Пазете уреда от удар, влажност, мръсотия, силни температурни амплитуди и пряка слънчева светлина.
- Не носете уреда докато нанасяте върху тялото си козметика.
- Работете внимателно с превключвателя и контролера. Не натискайте прекалено силно.
- Не пъхайте остри предмети в отвора на микрофона.
- Не докосвайте магнитите на уреда.
- Правете редовна профилактика на уреда.

Относно батериите:

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- Пазете батериите далече от деца поради риск от поглъщане.
- Съблюдавайте + и - поляритета на батериите.
- Ако батерия протече, използвайте ръкавици и почистете отделението за батерия със суха кърпа. Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерии, измийте веднага с вода и потърсете лекар.
- Ако няма да използвате уреда продължително време, извадете батериите.
- Пазете батериите от силна топлина и не ги хвърляйте в огън.
- Сменявайте всички батерии закуп като използвате същия тип.
- Не използвайте зарядни батерии.

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Микрофон
2. Регулиране на звука
3. Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ
I = ВКЛ / O = ИЗКЛ
4. Отделение за батериите
5. Слушалка
6. Накрайник на слушалката




4. ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА

Поставяне на батерии

- Отворете отделението за батерии.
- Махнете предпазното фолио от батерията (тип 13/PR48) и поставете батерията в отделението след 10-15 минути като спазите поляритета.
- Затворете отделението за батерии.

- Поставете желаня накрайник на слушалката.

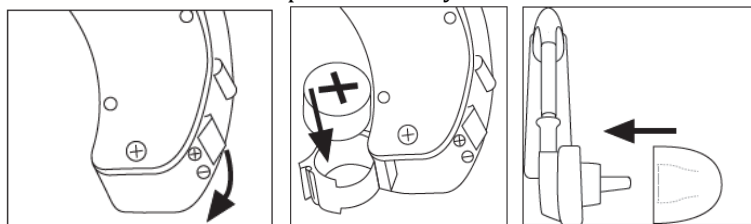

Уверете се, че уредът е на най-ниската настройка за звука.

- Поставете тапата на уреда внимателно в ухото си без да я вкарвате прекалено дълбоко в ушния канал.
- Поставете бутона за ВКЛ/ИЗКЛ в позиция "I" и настройте силата на звука на комфортно ниво.
 - Ако чувате леко свистене докато носете уреда, проверете добре ли е поставен накрайника. Ако е необходимо, сменете накрайника с друг.

5. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Поддържайте уреда чист.
- Махайте батериите преди почистване.
- Почиствайте уреда и накрайниците с чиста и суха кърпа след всяка употреба. Ако са прекалено мръсни, може да навлажните леко с мек миещ препарат. Не използвайте абразивни или корозивни препарати, както и разтворители.
- С издължен предмет или четка почиствайте ушната кал от накрайника.
- Оставете уреда да изсъхне напълно след почистване и го съхранявайте в кутията на сухо.
- Не потапяйте уреда във вода.

6. КОРИГИРАНЕ НА ГРЕШКИ

Проблем	Възможна причина
Не се чува звук	- Уредът не е включен. - Батерията не е поставена правилно. - Батерията е изхабена. - Микрофонът е мръсен. - Усилвателят е повреден.
Звукът е много слаб	- Усилвателят е на ниска настройка за звука. - Батерията е слаба.

	- Накрайникът е мръсен. - Микрофонът е мръсен. - Слушалката е повредена. - Отделението за батерия не е затворено.

7. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.

- ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуег не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.